

EickWarm / EickWarm II Heating Pad

Item No. 648048 / 648050

1. Vigtige brugsanvisninger

Denne måtte er designet til at levere skånsom varme til et dyr, mens det er på den, med 12 V DC strømforsyning for patientens sikkerhed. Da dette kun er en mild varme, vil enhver varme forsvinde, så snart den er skabt, og du kan faktisk blive undskyldt for at tro, at den ikke fungerer korrekt, især hvis du placerer din hånd på den og ikke føler nogen umiddelbar varme. Hvis du ønsker at teste måtten, foreslår vi at placere et tungt objekt, som f.eks. en stor bog, på toppen i cirka 30 minutter, og en let varme vil derefter begynde at opbygges.

2. Montering

Fjern al emballage. Kontrollér indholdet. Der bør være en måtte med kontrolboks, transformer og 2 ledninger – en UK og en europæisk. Tilslut de to stik fra kontrolboksen og transformeren. Sæt den passende ledning i transformeren.

3. Brugertips

3.1 Generelt

Placer måtten, hvor den skal bruges, og sørg for, at den holdes flad. Det anbefales ikke, at dyret placeres direkte på varmemåtten. Vælg den temperatur, der er mest passende for dyrets behov. Det er vigtigt at kontrollere dyrets temperatur med jævne mellemrum for at undgå overophedning. Brug et let materiale til at dække måtten; dette vil tillade varmen at komme igennem. Desuden kan patienten dækkes med et tæppe for at undgå varmetab.

Hvis den bruges direkte på en gulvoverflade, der ikke er isoleret, som f.eks. beton, foreslår vi at placere et materiale som et tæppe under for at forhindre varmetab gennem gulvet.

3.2 Indstilling af temperatur

EickWarm varmemåtten kan justeres i temperaturintervaller mellem 35 °C og 45 °C. Den har en timer, der automatisk slukker varmeren, når den valgte tid er udløbet. Dette hjælper med at forhindre hudafskalning, som kan opstå, når et dyr er efterladt på en varmemåtte i længere tid uden at blive vendt. Det anbefales ikke, at dyret placeres direkte på varmemåtten. Vælg den temperatur, der er mest passende for dyrets behov. Det er vigtigt at kontrollere dyrets temperatur med jævne mellemrum for at undgå overophedning. Når varme er påkrævet, bør strømforsyningen ikke afbrydes. Tryk på MODE-tasten, indtil den røde temperaturlampe er tændt. Brug UP- og DOWN-tasterne til at vælge den ønskede temperatur, som vises i LED'en i °C. Lad det være tilsluttet hele tiden, når varme er påkrævet.

3.3 Indstilling af tid

Tryk på MODE-tasten, indtil den orange tid-lampe er tændt. Brug UP- og DOWN-tasterne til at vælge den ønskede tid mellem 1 og 9 timer.

3.4 Betjening

Tryk på START-tasten, og måtten begynder at varme op. Den grønne varmelampe vil være tændt. Når den valgte tid er udløbet, vil den grønne varmelampe slukke, og varmemåtten slukkes også. Timeren vil stadig blive vist på LED-skærmen. Tryk på START-tasten, mens den grønne varmelampe er tændt, for at stoppe opvarmningen.

4. Rengøring

Afmonter altid måtten, før du rengør den. Måtten er indeholdt i et vandafvisende cover, som kan tørres af med et mildt desinfektionsmiddel. Ved kraftigt snavs kan et rengøringsmiddel anvendes. Læg aldrig måtten i vand.

5. Sundhed og sikkerhed

Varmemåtten bør tjekkes regelmæssigt, især når den bruges kontinuerligt, og når den anvendes på syge eller svage dyr. Hvis dyret, som måtten skal bruges til, har tendens til at tygge på den, anbefales det at tage nogle forholdsregler for at beskytte måtten. Dette kan gøres ved at skære et stykke tyndt krydsfiner, der er lidt større end måtten, og derefter dække det med et tungt tekstilmateriale, f.eks. jute eller lærred, som fastgøres på undersiden med måtten øverst. Varmen vil stadig trænge igennem det tunge lag.

Hvis dyret har en vedvarende tyggeadfærd, anbefales det at overveje at fjerne brugen af måtten. Hvis du ønsker at bruge måtten og er bekymret for tygning, kan der købes metalbeskyttere til kabel, som kan placeres over ledningen, fra de fleste byggemarkeder, ligesom en sikringsafbryder også kan købes

6. Service og reparation

I tilfælde af skade eller funktionsfejl bør der ikke forsøges at reparere måtten. I stedet skal den returneres til EICKEMEYER® eller kontaktes for yderligere information vedrørende klagen.

7. Kontakt

Hvis du har brug for hjælp eller rådgivning om første brug og installation, eller har spørgsmål vedrørende brugen af måtten, bedes du kontakte din lokale EICKEMEYER® kundeservice via telefon eller e-mail.

ADVARSEL – Følgende skal overholdes:

- Læg ikke måtten i vaskemaskinen eller send den til rensning.
- Brug ikke måtten, hvis den er våd.
- Brug ikke måtten, hvis den er foldet.
- Læg ikke måtten i vand.
- Udsæt ikke ledningen for belastning eller tryk.
- Sæt ikke nåle i måtten.
- Brug ikke måtten på møbler.
- Undgå at presse skarpe folder eller buk på måtten.
- Undersøg måtten regelmæssigt, især for tegn på slid og skade. Hvis der er tegn på skade eller andre problemer, skal måtten returneres til service. Vi anbefaler, at måtten serviceres hvert andet år – se "Service og reparation".

