

Rengøring og pleje Kirurgiske instrumenter

Vil du sikre dine instrumenters holdbarhed, er det vigtigt at rengøre instrumenterne grundigt før sterilisation. Dette gælder også fabriksnye eller nyreparerede instrumenter.

1) Læg instrumenterne i en beholder med desinfektions- og/eller rengøringsmiddel efter brug. Vær opmærksom på at følge producentens anvisninger ang. korrekt koncentration, temperatur og virkningstid. Leddelte instrumenter (sakse, klemmer, nåleholdere osv.) skal være åbne, og sammensatte instrumenter bør adskilles. Desinfektions-/rengøringsbadet bør skiftes dagligt, eller oftere ved intensiv brug. Den bedste rengøring opnås i et ultralydsbad, da dette også fjerner de mindste partikler, selv fra svært tilgængelige steder.

2) Rengør instrumenterne grundigt med en blød børste (f.eks. en tandbørste) og fjern alle rester. Dette gælder især for leddene samt i hulrum (f.eks. desinfektionsmiddel, varenr. 307315).

3) Efter manuel rengøring skal instrumenterne skylles grundigt, og synlige snavsrester skal fjernes. Ideelt bør den sidste skylning være med demineraliseret vand.

4) Instrumenterne skal umiddelbart efter steriliseringen tørres helt; mellemrum og led kræver ekstra omhyggelighed. En skånsom og effektiv metode til tørring er at bruge trykluft. Alternativt kan du bruge en blød, fnugfri klud.

5) Gennemgå de tørrede instrumenter omhyggeligt for rester. Vær særligt opmærksom på kritiske områder, f.eks. håndtagsstrukturen, led, osv. Vi anbefaler at bruge en arbejdslampe med integreret forstørrelse.

4) Pleje: Påfør plejemidler på led, lukninger, forskruninger og glideflader for at undgå friktion mellem metal og dermed friktionskorrosion. Det er nødvendigt at bruge speciel instrumentolie (f.eks. instrumentolie med varenr. 563707). Tjek om instrumenterne fungerer, da defekte instrumenter skal sorteres fra. Disse instrumenter er du velkommen til at sende til vores teknikerservice. Vi reparerer alle instrumenter, og som regel betaler reparationen sig.



“

**GRUNDIG RENGØRING
PERFEKT
HYGIEJNEHÅNDBTERING**

”