

## **Brugsanvisning til DUVAIR Varmluftdyner**

DUVAIR Varmluftdyner anvendes altid sammen med en varmluftblæser.  
Alle medicinsk godkendte varmluftblæsere på markedet kan anvendes sammen med DUVAIR.

Varmluftdynerne placeres så vidt muligt altid over patienten, således at mest muligt af dyrets krop er dækket, mens der samtidig skabes adgang for det kirurgiske indgreb. Der vælges en passende størrelse varmluftdyne afhængig af dyrets størrelse og indgrebets art.  
Undgå at selvkøbende kanter fra steril-afdækninger sættes på dynen da de kan være vanskelige at fjerne igen.

Ved anvendelse til præ-opvarmning og post operativ genopvarmning dækkes hele dyret med en, for dyrets størrelse, passende varmluftdyne.

Ved anvendelse af model Baby REF 92257 kan dyret placeres ovenpå dynen.

### **Bemærk:**

Dynens lyseblå side skal altid vende mod dyret.

Dynen anvendes til at optimere dyrets kropstemperatur når den tilsluttes en varmluftblæser med følgende karakteristik:

Maksimal luftmængde: 100 m<sup>3</sup> / time og maksimal lufttemperatur: 46° C

Dynen skal vaskes ifølge vaskeanvisningen før ibrugtagning og efter hver anvendelse.

### **Advarsel:**

Overvåg dyrets kropstemperatur med jævne mellemrum.

Anvend ikke varmluftterapi på iskæmiske kropsdele, da det kan medføre varmeskader.

Udvis særlig opmærksomhed ved dyr med dårlig cirkulation.

Tildæk aldrig dyrets frie luftveje med dynen.

## **DUVAIR Varmluft dyner: Vaske anvisning**

Materialer: Polyester Microfiber: MicroPES og Polyurethan coated MicroPES.

MicroPES fibre har Økotex mærkning klasse 1

Det garanteres at dynerne kan vaskes mindst 150 gange uden forringelse af de tekniske egenskaber.

På grund af overskudsfarve: Vaskes separat de første 2 gange

Sidste hold skyllevand tilsættes skyllemiddel med antistatiske egenskaber.



Vaskes ved max. 95 ° C



Tørretumbler max. 80 ° C



Tåler ikke klørblegning



Tåler ikke kemisk rens



Kan stryges ved lav temperatur

Dynerne kan tåle damp autoklave 134° C / 2 bar, men der er ikke udført afprøvning af steriliteten efter autoklavering.

Det garanteres således **ikke** at dynerne er sterile efter autoklavering, men det bekræftes at dynerne tåler temperatur og tryk.



DUVAIR